




**Erst KLICK  
dann KNACK!**

# S-Monovette®

Beendigung der Blutabnahme


**1.**

Kolben bis ganz  
nach hinten ziehen

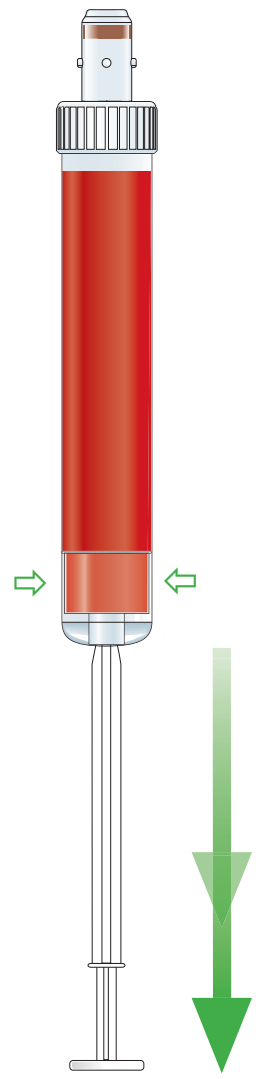

Ziehen Sie die Kolbenstange  
gerade zurück, bis der Kolben mit  
einem hörbaren **KLICK** einrastet.

**2.**

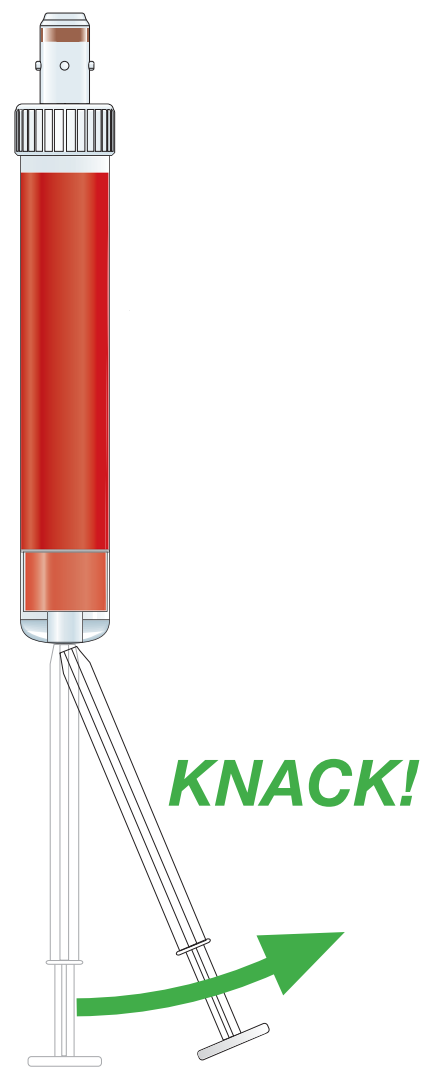

Erst dann brechen Sie  
die Kolbenstange ab! **KNACK!**

Technische Änderungen vorbehalten  
Diese Publikation kann Informationen zu Produkten enthalten, die evtl. nicht in jedem Land verfügbar sind  
718-100

SARSTEDT AG & Co.  
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht  
Telefon +49 22 93 305-0  
Telefax +49 22 93 305-3450  
**Service 0800 (Deutschland)**  
Telefon (0800) 0 83 305-0  
info@sarstedt.com  
www.sarstedt.com

